

FFP2NR Media Mascarilla Filtrante




Modelo: POMAN FFP2


- **Tamaño:** 110 x 90 mm. **INFANTIL.** Para niños de 3-10 años
- **Color:** blanco
- **Material:**
Capa exterior 100% poliéster
Capa media 100% tela no tejida
Capa filtrante: 1:100% PTFE
Capa interna: 100% poliéster
- **Certificación según la norma:** EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR GB2626-2006
- **CE 1463**
- **Nivel de filtración:** P2
- **(EFB)** Eficiencia de filtración bacteriana $\geq 99\%$
- **Fabricado por:**
Zhejiang Compass Medical Technology Co., Ltd.



Leer información antes de utilizar la mascarilla

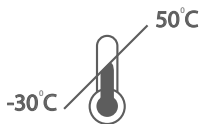

Temperatura de almacenamiento

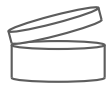

Fecha de vencimiento
2023-11



Fecha de producción
2020-11



Almacenar en ambientes limpios con humedad relativa $< 80\%$




2020-11

Advertencias:

- . Comprueba la integridad de la unidad y sus componentes antes de usarla, si la unidad está dañada no utilizarla.
- . Debe realizar un ajuste facial adecuado.
- . La mascarilla no deben ser nunca modificada, alterada o forzada.
- . La media mascarilla filtrante no se debe utilizar para más de un uso.
- . Este producto no se puede utilizar como máscara de gas en un entorno tóxico.
- . Este producto no se puede utilizar con fines médicos ni quirúrgicos y debe ser desechada según la normativa local.
- . Periodo de uso recomendado 4 h.


Instrucciones de uso:

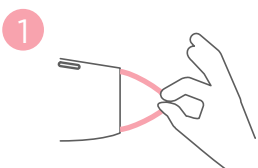

1
Lavarse las manos antes de tocar la mascarilla. Toca sólo las gomas de la mascarilla.



2
Póntela sobre nariz y boca, asegurándote de que no quedan grandes espacios entre tu cara y la mascarilla.

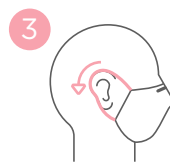

3
Pasa las bandas elásticas por detrás de tus orejas.



4
Pellizca la pinza nasal para ajustarla bien a la nariz.



5
Para desecharla, introdúcela en una bolsa de plástico. Depositála cerrada en la basura.

